



SURGISPON® DENTAL



Comprometimento e qualidade fazem parte do nosso DNA.





BENEFÍCIOS/VANTAGENS

SURGISPON® é uma esponja hemostática de gelatina estéril absorvível composta de espuma de gelatina farmacêutica pura (colágeno hidrolisado liofilizado), resultando em uma porosidade uniforme e reação neutra.

A espuma seca é cortada, embalada e esterilizada por radiação gama.

SURGISPON® está disponível para uso imediato na sala de cirurgia e não requer esterilização por calor ou autoclavagem.



Como usar o SURGISPON® Dental

- Mergulhe o cubo em solução salina estéril ou use-o seco.
- Se usado seco, a esponja deve ser ligeiramente comprimida. As esponjas devem ser aplicadas à área da hemorragia sob pressão leve, por um ou dois minutos, até que o sangramento seja interrompido.
- Se usado molhado, retire os cubos SURGISPON® da solução e aperte cuidadosamente entre os dedos, utilizando luvas, para expelir as bolhas de ar. Recoloque no soro fisiológico até que necessário.
- Quando a hemorragia for controlada, os cubos podem ser deixados in situ. SURGISPON® pode ser combinado com antibióticos, trombina e quimioterápicos sem redução do efeito hemostático das esponias.

Leia atentamente as instruções aplicáveis antes de usar.

Aplicações da SURGISPON® Dental


Obtenção da hemostasia imediata em extrações e cirurgias de tecidos moles.



EXTRAÇÕES DENTÁRIAS A hemorragia exsudativa do alvéolo é interrompida pela aplicação do cubo SURGISPON® Dental.



ENUCLEAÇÃO DE CISTOS DETALHE Hemorragia controlada Implantaça com o cubo dental. tal na cavi

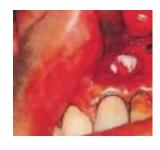


DETALHE Implantação do cubo dental na cavidade.



CONTROLE DE PROFUSÃO Controle da hemorragia após extração dentária, por meio de vários cubos dentais.



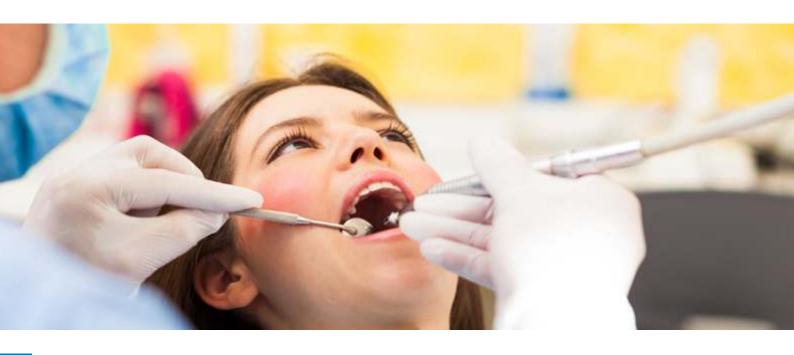

Informações de Compra



SSP 101010.10 - CUBO SSP 101010.32 - CUBO



SSP 1208 – TAMPÃO



SSP 202007 – LÂMINA

ID do produto	Produto	Dimensões (mm)	Unidades por caixa
SSP 101010.10	CUBO	10x10x10	10
SSP 101010.32	CUBO	10x10x10	32
SSP 108	TAMPÃO	12x08 Ø	32
SSP 202007	LÂMINA	20x20x07	20



Avenida Julio Antonio Thurler, N° 145/ Sala 204 - Olaria – Nova Friburgo - RJ - Cep. 28620-000 CNPJ: 01.686.305/0001-61 - Inscrição Estadual: 86.119.315

 $(\ 22\)\ \textbf{2519-0805}\ \ |\ (\ 21\)\ \textbf{3559-3317}\ |\ (\ 21\)\ \textbf{3529-3774}\ |\ (\ 21\)\ \textbf{2599-3283}$

e-mail: alexandre@danialex.com.br / anacristinart@danialex.com.br

danialex.com.br

